



Pravilno rukovanje

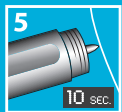



1. Nakon postavljanja igle na pen prvo uklonite zaštitni poklopac.
2. Zavrnite iglu na Vaš inzulinski pen (odgovara svim standardnim penovima) i skinite vanjsku zaštitnu kapicu s igle.
3. Nakon uklanjanja vanjske zaštitne kapice provedite test protočnosti. Da biste to učinili, postavite 2 jedinice inzulina na penu i ubrizgajte ga u zrak.
4. Ponovite ovaj postupak dok se na vrhu igle ne pojavi kap inzulina.
5. Sada možete postaviti traženu dozu inzulina na inzulinskom penu. Ubodite iglu u kožu i pritisnite gumb na penu. Brojite do 10 te zatim izvucite iglu iz kože.
6. Odvrnite iskorištenu iglu sa pena – možete koristiti vanjsku zaštitnu kapicu. Iskorištenu iglu odložite u sigurnu posudu za odlaganje.



Posjetite nas na
www.wellion.hr

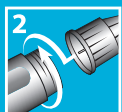

THE MEDICAL SERVICES COMPANY

MED TRUST d.o.o. • Utinjska 3E • 10 000 ZAGREB
 Tel.: +385 (0)1 551-4025 • Fax: +385 (0)1 551-4028 • e-mail: info@medtrust.hr • www.medtrust.hr

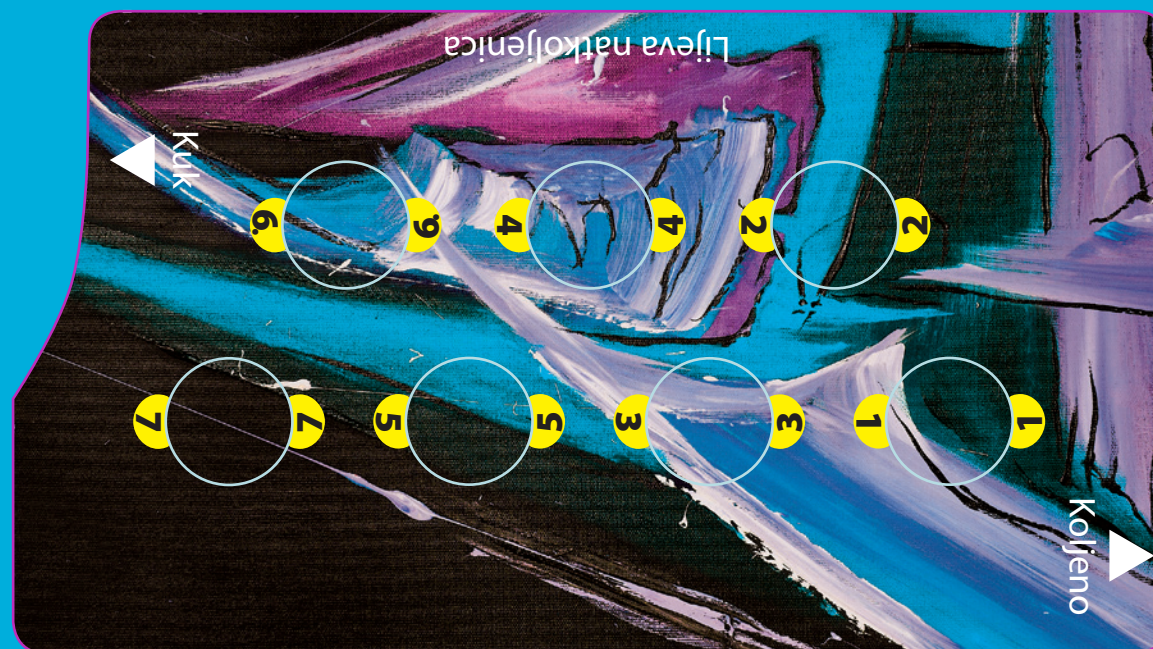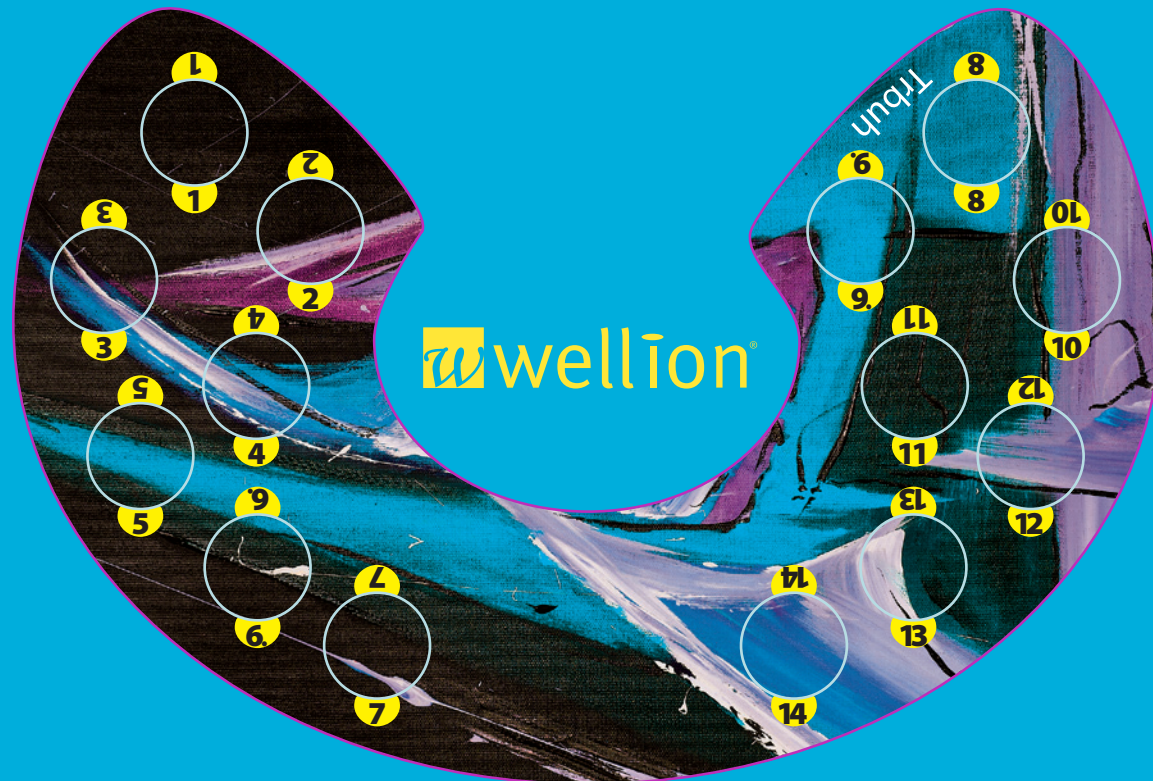

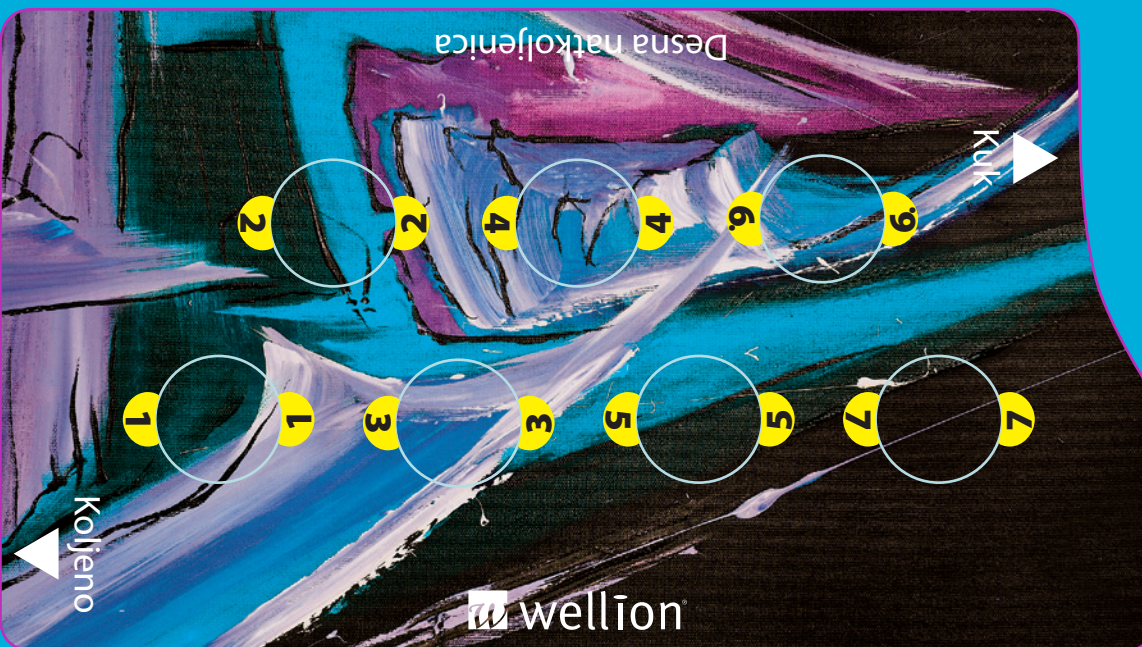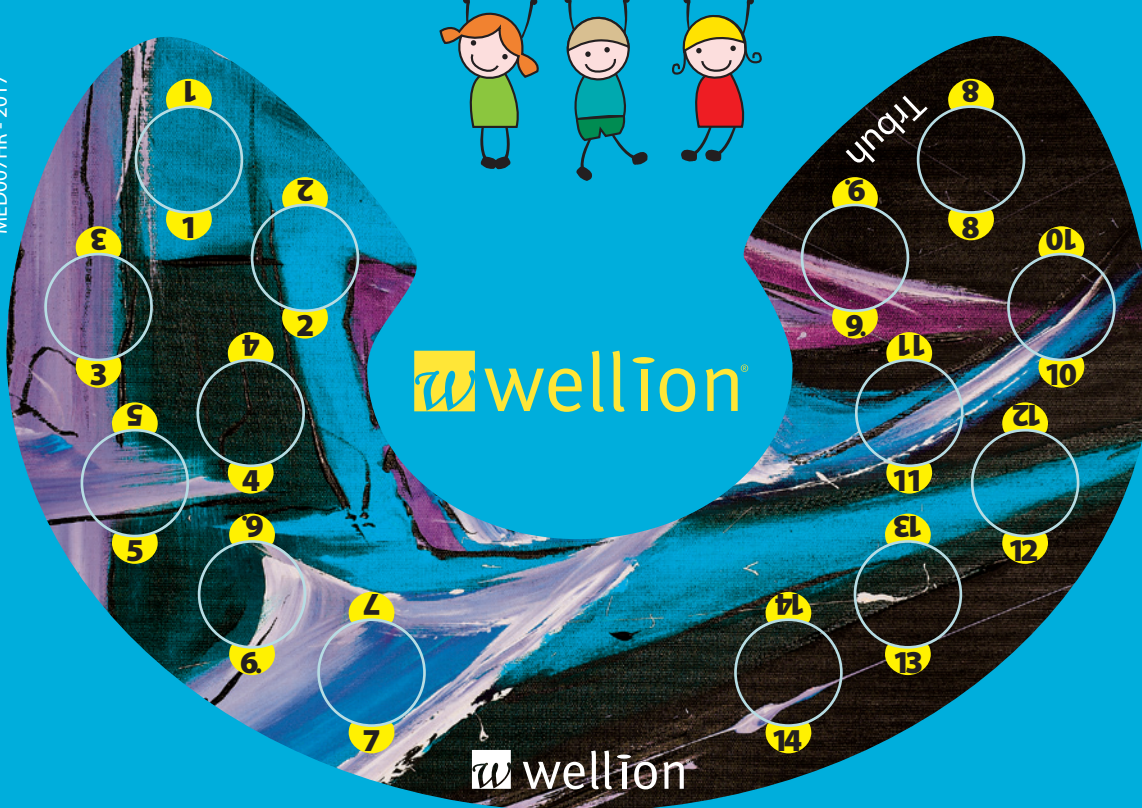


wellion
MEDFINE^{plus}
IGLE ZA PENOVE



AUSTRIJSKA
linija proizvoda
za dijabetes


Pravilno rukovanje

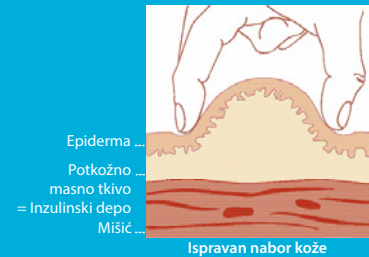

Kako ispravno ubrizgati inzulin?

Inzulin morate ubrizgati u potkožno masno tkivo. Odatle se apsorbira u tijelo i postiže željeni učinak na razinu šećera u krvi. Slučajno ubrizgavanje u mišić može se dogoditi kada koristite predugačku iglu što treba izbjegavati. Inzulin slučajno ubrizgan u mišić apsorbira se vrlo brzo te može dovesti do hipoglikemije (niskog šećera u krvi). Formiranje nabora kože pomaže u sprječavanju takvih incidenata.

Kako odabrati odgovarajuće mjesto uboda?

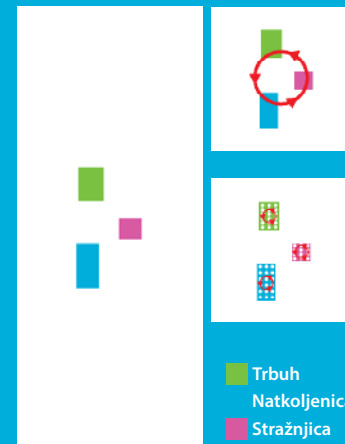

Najčešće korištena mjesta za ubrizgavanje inzulina su trbuh, zatim bedra i stražnjica. Na raznim dijelovima tijela debljina potkožnog masnog tkiva varira: što deblji sloj potkožnog masnog tkiva, to sporija apsorpcija inzulina u krvotok. Na ovaj način možete kontrolirati djelovanje inzulina!

Zdravstveni djelatnici često tijekom edukacije pacijenata preporučuju izmjenu mjesta ubrizgavanja inzulina u različito vrijeme.

Obratite pozornost – iglu koristite samo jednom

Igle za penove su jednokratne. Svaki puta koristite novu iglu za ubrizgavanje – zbog Vašeg zdravlja!

Korištenje igle više puta može dovesti do neželjenih posljedica:

- Bol, jer je silikonski premaz koji omogućava lakši ulazak igle u kožu potrošen kod prvog korištenja.
- Bol zbog otupljenog vrha igle
- Netočno doziranje inzulina uslijed djelomičnog začepljenja igle zbog kristalizacije ostataka inzulina ostalih u igli od prethodnog ubrizgavanja
- Lipohipertrofija uslijed manjih ozljeda na mjestu uboda

