

## Pravilno rukovanje

**Obratite pozornost – iglu koristite samo jednom**

Igle za penove su jednokratne. Svaki puta koristite novu iglu za ubrizgavanje – zbog Vašeg zdravlja!

Korištenje igle više puta može dovesti do neželjenih posljedica:

- Bol, jer je silikonski premaz koji omogućava lakši ulazak igle u kožu potrošen kod prvog korištenja.
- Bol zbog otupljenog vrha igle
- Netočno doziranje inzulina uslijed djelomičnog začepljenja igle zbog kristalizacije ostataka inzulina ostalih u igli od prethodnog ubrizgavanja
- Lipohipertrofija uslijed manjih ozljeda na mjestu uboda




AUSTRIJSKA  
 linija proizvoda  
 za dijabetes

**wellion®**

Posjetite nas na  
[www.wellion.hr](http://www.wellion.hr)


**wellion®**

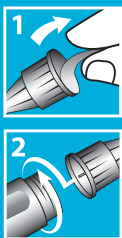

1. Nakon postavljanja igle na pen prvo uklonite zaštitni poklopac.
2. Zavrните iglu na Vaš inzulinski pen (odgovara svim standardnim penovima) i skinite vanjsku zaštitnu kapicu s igle.



3. Nakon uklanjanja vanjske zaštitne kapice provedite test protočnosti. Da biste to učinili, postavite 2 jedinice inzulina na penu i ubrizgajte ga u zrak.
4. Ponovite ovaj postupak dok se na vrhu igle ne pojavi kap inzulina.

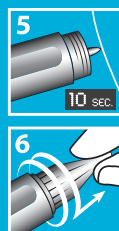

5. Sada možete postaviti traženu dozu inzulina na inzulinskom penu. Ubodite iglu u kožu i pritisnite gumb na penu. Brojite do 10 te zatim izvucite iglu iz kože.
6. Odvrnite iskorištenu iglu sa pena – možete koristiti vanjsku zaštitnu kapicu. Iskorištenu iglu odložite u sigurnu posudu za odlaganje.

**wellion®**